

Hinweise für die Ausstrichdiagnostik (Blutausstriche)

Ausgangsmaterial:	EDTA
max. Zeit bis zum Anfertigen des Ausstrichs:	8h (Lagerung Blut bei Raumtemperatur)
Objektträger:	z.B. Super Frost Art. 03-0040 R. Langenbrinck
Blutmenge pro Ausstrich:	3,5 μ l (s. Bild)
Beschriftung:	mit Bleistift (Name des Patienten)
Ausstrichversand:	spätestens 1-2 Tage nach Anfertigung (bei internationalen Versand ggf. einzeln in Frischhaltefolie verpacken)

